

備註: 儀器若是進入休眠狀態, 請按下儀器上的任意鍵, 進行開機


1 測量步驟

a) 選擇性別




選擇性別時, 男性不顯示女性會有圖像顯示。此外, 將子宮切除的女性必須選擇男性的模式進行測量

b) 塗抹傳導膠

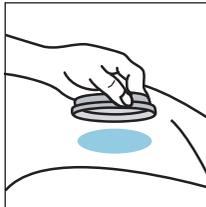


請將傳導膠塗抹於恥骨上方(3公分處)

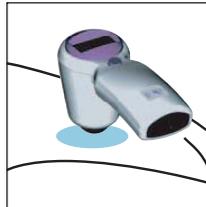

請將探頭放置於傳導膠的位置

c) 瞄準膀胱位置

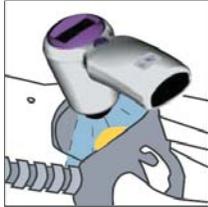

瞄準膀胱位置
將探頭朝向尾椎骨方向

d) 按下測量鍵



e) 確認測量結果





如有閃爍箭號, 則需重新掃描
請依照箭頭方向, 再次掃描



未顯示箭號, 則此測量數據可接受, 不需要再重複測量

2 進行語音紀錄

2A 測量後, 持續按著性別鍵(約五秒鐘), 儀器會發出(嗶)的一聲畫面也會跟著顯示出麥克風的圖示, 就即可操作錄製語音紀錄出現麥克風圖示後, 仍需持續按著(性別鍵), 直到完成所有錄製放開(性別鍵)後, 儀器會播放一次剛剛所錄製的語音紀錄。

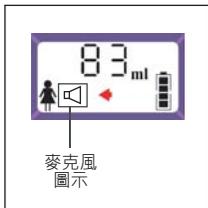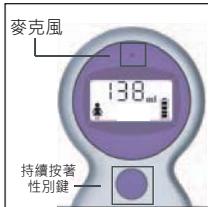

2B 如果需要重新錄音, 請重複步驟 2A

3 如果接受此語音紀錄, 並想進行下一個測量, 請返回步驟 1

4 如果畫面顯示紀錄已滿, 則需將資料傳輸至 ScanPoint® 網站上

- 膀胱容量低估: 病患具有相當程度疝氣(hernias), 大型憩室(diverticula), 或腸囊腫外科整形(enterocystoplasty), 其部份膀胱會超出掃描範圍, 而無法包含在計算尿量之中。
- 膀胱容量高估: 若鄰近膀胱位置有液體積聚, 例如懷孕, 或腹水(ascites), 卵巢的囊腫(ovarian cysts), 其液體容量會包含在計算尿量之中。
- 過度肥胖。
- 嚴重的腹部(恥骨上的)疤痕。
- 留置導尿管尚未移除前。
- 掃描部位正好有新撕裂傷口。

BladderScanBVI 6400 簡易故障排除步驟

- BVI6400按任何按鍵都無反應
通常因為當機、電池失效或沒電所導致, 請使用一根細桿插入掃描鍵上方的暗孔重新開機, 再充電6個小時。
- 儀器嗶嗶聲
儀器會在下列情況產生嗶嗶聲:
 - 啟動儀器時
 - 儀器進入睡眠模式節約電力。
 - 電池電量過低時, 電池需要再充電, 這情形下, 電池指示顯示無電力格。請把儀器置放在充電座或傳輸座過程中給電池再充電。
 - 需要校準儀器。
 - 儀器運作中並未完成膀胱容量或者校準測量。
 - 儀器已經開始或者完成把數據傳送到ScanPoint。
 - 成功完成校準程式。
 - 你選擇或者取消女性選擇。
- 螢幕顯示半個太陽及三個閃爍的0
這表示您的BVI6400已超過校準期限, 為了確保儀器的準確性, 請聯繫態能企業有限公司替您的儀器安排校準。